


Empfang und Auspacken Ihrer DNA Proben

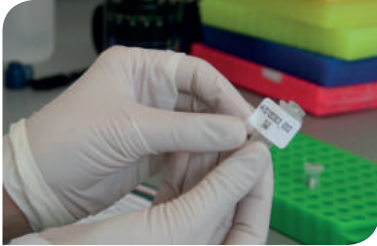

Die Spitze des Tupfers wird vom Stäbchen abgetrennt und zur DNA Extraktion in ein Reaktionsgefäß mit Barcode überführt.




Die Proben werden anschließend mit dem Barcode registriert.



Die Durchführung der DNA Analyse findet maschinell im Hochdurchsatz statt.



Die Laborergebnisse werden im 4-Augen Prinzip von unseren Gutachtern ausgewertet.

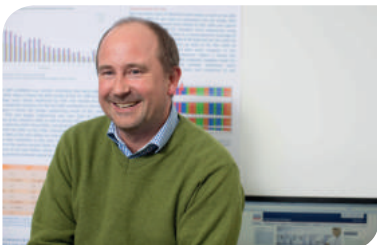

Dr. Burkhard Rolf,
Privatdozent für
Forensische Genetik und
Leiter unserer Abteilung
DNA Forensic Services



Vaterschaftstests.de

Die dokumentierte Probenahme - Anleitung -



Fragen?
Wir helfen weiter:
08092 8289 222



www.vaterschaftstests.de

Eurofins Medigenomix Forensik GmbH
Anzinger Str. 7a
D-85560 Ebersberg



Probennehmer bei der gesetzlich vorgeschriebenen Identitätssicherung während einer Probenahme sind:

Arzt, Apotheker, Hebamme, Mitarbeiter des Jugend- oder Gesundheitsamtes, Krankenhauspersonal, Notar.
Sie begleiten die Probenahme, kontrollieren und übertragen die persönlichen Daten und versenden die Testunterlagen.

Stellen Sie sicher, dass alles ausgefüllt und unterschrieben ist.

Die Analyse wird sich verzögern, wenn Unterschriften oder Unterlagen fehlen. Für Minderjährige unterschreiben **alle** Sorgeberechtigten.

Der Probennehmer

Öffnen Sie den Umschlag "Probenentnahmeset".
Bitte die Teststäbchen NICHT verwenden, wenn das Siegel bereits gebrochen ist.

- Mit Hilfe der Testteilnehmer beschriften Sie die Probenumschläge.
- Machen Sie eine klare, deutliche Kopie aller Ausweisdokumente bzw. Geburtsurkunden.
- Jeder Testteilnehmer erhält dann ein verschlossenes Päckchen mit Wattestäbchen.



Komplettierung der Unterlagen

- Alle Teilnehmer geben ihre schriftliche Einwilligung (Seite 1).
- Der Probennehmer bestätigt die korrekte Durchführung der Probenahme (Seite 1).
- Geben Sie uns Ihre Kontaktdaten und bestellen Sie Ihr persönliches Gutachten (Seite 2).



Entnahme der Proben

- Ein Testteilnehmer entnimmt 1 Probenstäbchen.
- Der Watteteil wird nicht berührt.
- Mit einer leichten Drehbewegung wird das Wattestäbchen an der Wangeninnenseite gut hin und her gedreht, um genug Zellmaterial zu entnehmen.
- Der Vorgang wird mit dem 2. Stäbchen auf der anderen Mundseite wiederholt.



Rücksendung an unser Labor

Der Probennehmer legt die kompletten und unterschriebenen Unterlagen in den Rückumschlag:

- ✓ alle Formulare
- ✓ die Kopien der Ausweise bzw. Geburtsurkunden
- ✓ die beschrifteten und verschlossenen Probenumschläge

Der *Probennehmer* sendet den Rückumschlag an uns. Anderes ist nicht zulässig (Gefahr der Manipulation an den Proben) und führt dazu, dass wir den Test nicht bearbeiten können.



Verpacken der Teststäbchen

- Die benutzten Teststäbchen direkt nach der Probenahme ohne Trocknungszeit in den beschrifteten Probenumschlag stecken.
- Für die Probenahmen bei den anderen Testpersonen bitte genauso verfahren.
- **Vertauschungen vermeiden:** Probenahme eines Teilnehmers erst komplett abschließen, bevor mit der nächsten begonnen wird.



Der Versand Ihres Gutachtens

Gutachten werden an alle auf Seite 2 aufgeführten Personen gesendet.

Für DNA Vaterschaftstests versenden wir unsere Gutachten spätestens 4 Werktage nach Erhalt der kompletten Unterlagen und der Zahlung. Andere DNA-Tests haben eine längere Bearbeitungszeit.

